


# CLINIQUE VIRTUELLE EN SOINS DE PLAIES

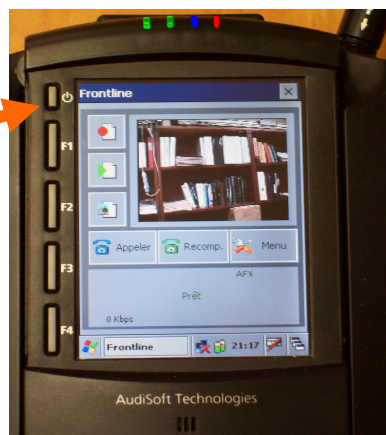


- 1** Démarrer le Frontline Communicator en appuyant sur le bouton de mise en marche de l'appareil.

Bouton mise en marche



- 2** Attendre l'ouverture du programme Frontline et appuyer sur le bouton de mise en marche de la caméra.


Bouton mise en marche

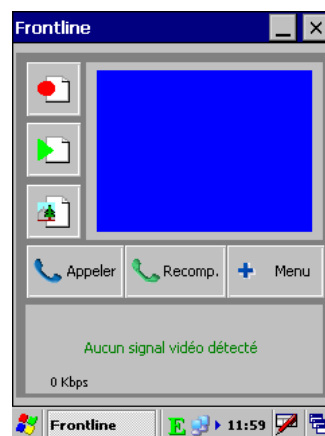


- 3** Positionner la caméra pour bien visionner la plaie du patient.





- 4** Peser sur le bouton « Appeler » du logiciel Frontline pour entrer en communication avec le poste d'assistance.

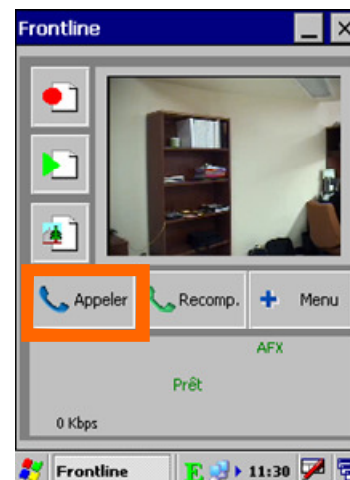

- 5** Dans l'onglet *Favoris*, choisir le favoris puis peser sur le bouton *Appeler*.

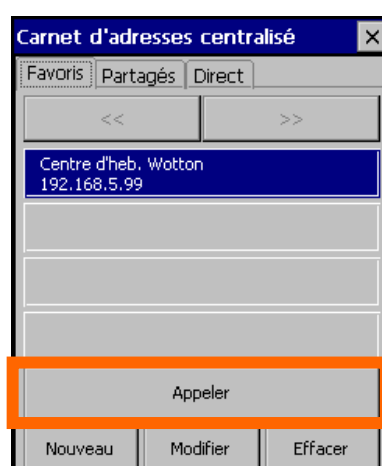

- 6** Si votre interlocuteur répond, commencer la clinique virtuelle. Sinon, lui téléphoner ou attendre quelques minutes et réessayer.

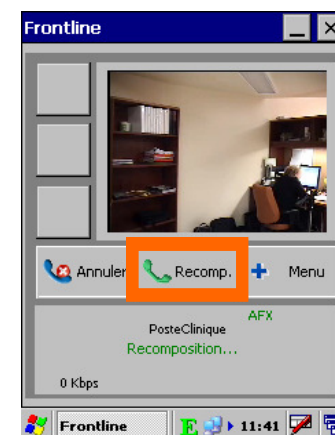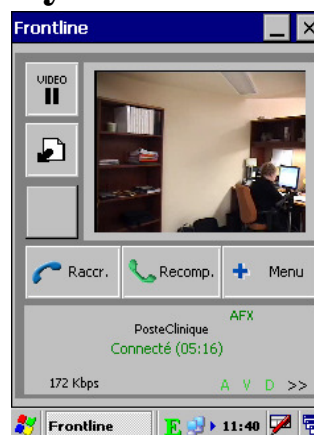

- 7** En cas de problème technique, entrer en contact avec:

Support privilégié:

819-346-1100, poste 16158

Support continu:

Estrie : 819-829-0084 Option : 5 Autres : 1-866-942-0084 Option : 5

